


The logo features the word "MOSAIC" in a large, black, stylized serif font with a trademark symbol. Below it, the word "CUSHION" is written in a white, sans-serif font inside a black rectangular box. To the right of the text is a stylized illustration of a cushion with a grid of rounded rectangular segments, rendered in shades of gray. The background is white with scattered gray squares of varying sizes, some forming larger, faint patterns.

# MOSAIC™

## CUSHION

## OPERATIONS MANUAL

A decorative graphic consisting of a cluster of gray squares of various sizes, arranged in a roughly rectangular shape with some squares missing, located in the bottom left corner.

MOSAIC Pude • Het MOSAIC kussen • Coussin MOSAIC  
MOSAIC-pehmike • MOSAIC-Kissen • ΜΩΣΑΙΚΟ μαξιλάρι  
Cuscino MOSAIC • MOSAIC-pute • Almofada MOSAIC  
Cojín MOSAIC • MOSAIC-dyna

## **ΜΩΣΑΙΚΟ μαξιλάρι**

Το ΜΩΣΑΙΚΟ μαξιλάρι είναι ένα ρυθμιζόμενο προϊόν που μπορείτε να του ρυθμίσετε το σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ο σκοπός του είναι, το άτομο που το χρησιμοποιεί να "βυθίζεται" μέσα στο μαξιλάρι όσο το δυνατό πιο βαθιά χωρίς όμως να ακουμπά στο βάθος του.

Για να επωφεληθείτε όσο το δυνατό περισσότερο από το καινούριο σας ΜΩΣΑΙΚΟ μαξιλάρι, ακολουθήστε τα εξής.

1. Στρίψτε την βαλβίδα του μαξιλαριού προς τα αριστερά για να ανοίξει.
2. Τοποθετήστε την χειροκίνητη αντλία πάνω στη βαλβίδα και φουσκώστε το μαξιλάρι μέχρι να αρχίσει να σχηματίζει καμπύλη.
3. Αφαιρέστε τον σωλήνα της αντλίας από την βαλβίδα και στρίψτε την προς τα δεξιά για να κλείσει.
4. Πάνω στο παραφουσκωμένο μαξιλάρι τοποθετήστε το άτομο στην κανονική του καθιστή θέση τοποθετώντας κανονικά τα ακουμπιστήρια για τα χέρια και τα πόδια.
5. Τοποθετήστε το χέρι σας μεταξύ του μαξιλαριού και του βαθύτερου κοκκαλου που εξέχει του ατόμου.
6. Έχοντας έτσι το χέρι σας, στρίψτε αργά την βαλβίδα προς τα αριστερά για να ξεφύγει λίγος αέρας και να βυθιστεί το άτομο μέσα στο μαξιλάρι. Όταν δεν μπορείτε πια να κουνήσετε τις άκρες των δακτύλων σας (περίπου 1-1 1/2 ίντσα) μεταξύ του πιο βαθιού κοκκάλου που εξέχει του ατόμου και της βάσης του μαξιλαριού, στρίψτε την βαλβίδα προς τα δεξιά για να κλείσει.

**Καθαρισμός:** Μπορείτε να καθαρίσετε το ΜΩΣΑΙΚΟ μαξιλάρι σας με χλιαρό νερό και σαπούνι. Ξεβγάλτε το καλά και αφήστε το να στεγνώσει. (Προτού το βάλετε μέσα στο νερό βεβαιωθείτε αν οι βαλβίδες του είναι καλά κλεισμένες). Μη χρησιμοποιήσετε λευκαντικό για να πλύνετε αυτό το προϊόν.

**ΜΗΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΛΕΙΝΕΤΕ**

**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ**

Κάθε ΜΩΣΑΙΚΟ μαξιλάρι έρχεται με το κάλυμμα του για να προστατεύεται η επιφάνεια του. Πλένετε την μηχανή με κρύο νερό και στεγνώνετε με αέρα.

**Επιδιορθώσεις:** Μαζί με το ΜΩΣΑΙΚΟ μαξιλάρι υπάρχουν και δύο κομμάτια μπαλώματος για επιδιόρθωση που κολλούν με πίεση. Αν υπάρχει τρύπα, εντοπίστε και καθαρίστε το κομμάτι γύρω από την τρύπα. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει. Αφαιρέστε το χαρτί από το πίσω μέρος του μπαλώματος και τοποθετήστε το μπάλωμα πάνω στο κέντρο της τρύπας. Πιέστε το δυνατά μέχρι να κολλήσει καλά. Τώρα το μαξιλάρι είναι έτοιμο για χρήση. Ακολουθήστε τις πιο πάνω οδηγίες για την ρύθμιση.

Όλες οι επιστροφές απαιτούν έγκριση από την The ROHO Group, και θα τους χρεωθεί η τιμή για επαναποθήκευση. Με την εγγύηση της επιστροφής απαιτείται και η απόδειξη αγοράς.

Χρήση για ένα μόνο ασθενή.

**European Union Authorized Representative  
(MDD 93/42/EEC)**

12-month limited warranty  
**SINGLE PATIENT USE**

**Medical Device Safety Service GmbH  
Burckhardstr.1  
D-30163 Hannover - Germany**



100 N. Florida Ave. • Belleville, IL 62221 U.S.A.  
800.851.3449 • 618.277.9173 • Fax 618.277.9561  
U.S. & Canada: 1-800-851-3449, Fax 1-888-551-3449  
Outside the U.S. & Canada: 1-618-277-9150, Fax 1-618-277-6518